

ALECTOIN krople d/oczu z ektoiną * 10ml



Cena: 26,89 zł

Opis produktu

ALECTOIN KROPLE

Przed zastosowaniem kropli ALECTOIN prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować nie-
niejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących używania
preparatu należy skontak-
tować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.

1. Co to jest ALECTOIN i jakie ma zastosowanie

Krople do oczu ALECTOIN są wyrobem medycznym zawierającym ektoinę (Ectoin®), naturalną
cząsteczkę chroniącą komórki
przed oddziaływaniem szkodliwych czynników, łagodzącą stany zapalne i stabilizującą błony
komórkowe. Krople do oczu

ALECTOIN to izotoniczny roztwór przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia
objawów alergiczne-
go zapalenia spojówek.

Krople skutecznie łagodzą zaczerwienienie, swędzenie i łzawienie oczu. W ciągu 30 sekund następuje
szybka redukcja ob-

jawów takich jak swędzenie, łzawienie i podrażnienie oczu. Chronią oczy przed szkodliwym wpływem
alergenów, przyspie-

szając proces regeneracji podrażnionej i nadwrażliwej spojówki. Krople mogą być stosowane przez
osoby noszące soczewki

kontaktowe oraz osoby z nadwrażliwością oczu. Krople do oczu ALECTOIN nie zawierają środków

konserwujących.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kropki do oczu ALECTOIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub na inne składniki kropli do oczu.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej po zastosowaniu produktu należy niezwłocznie przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Ze względów higienicznych zaleca się, aby produkt stosowany był tylko przez jednego użytkownika.

Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia. Nie używać produktu zniszczonego lub uszkodzonego. Krople do oczu Alectoin należy przechowywać w miejscu nieodstępnym dla dzieci.

3. O czym trzeba wiedzieć przed użyciem kropli ALECTOIN

Brak jest dostępnych danych dotyczących interakcji między kroplami do oczu ALECTOIN a innymi kroplami lub stosowanymi miejscowo maściami do oczu, stąd nie zaleca się stosowania z innymi preparatami do miejscowego leczenia okulistycznego.

4. Sposób użycia

ALECTOIN należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zakraplać 1-2 krople do każdego oka kilka razy dziennie. W razie

potrzeby, krople do oczu ALECTOIN mogą być używane kilka razy w ciągu godziny.

1. Zdjąć osłonkę zabezpieczającą końcówkę zakraplacza, uważając aby nie dotknąć końcówki zakraplacza.

2. Palec wskazujący i środkowy położyć na okrągłej płytce na czubku buteleczki, kciuk przykładając do jej spodu.

3. Przed pierwszym użyciem należy odwrócić butelkę zakraplaczem w dół i naciskać kciukiem na spód butelki (ok. 2-3 razy)

do momentu spłynięcia pierwszych kropli. Nie odcinać końcówki zakraplacza.

4. Odchylić głowę, palcem wskazującym odciągnąć dolną powiekę w dół i patrząc w górę zakropić preparat do oka trzy-

mając butelkę zakraplaczem w dół i naciskając okrągłą płytkę na butelce. Unikać bezpośredniego kontaktu końcówki

zakraplacza z palcami, oczami lub soczewkami kontaktowymi. Dzięki opatentowanemu mechanizmowi z pompką, z buteleczki wypłynie tylko jedna kropla.

5. Zamknąć powoli oko tak, aby preparat równomiernie rozproszony na soczewce oka.

6. W ten sam sposób zakropić preparat do drugiego oka.

7. Po każdym zastosowaniu należy osuszyć końcówkę zakraplacza i zamknąć ją osłonką zabezpieczającą.

5. Możliwe skutki uboczne

ALECTOIN jest dobrze tolerowanym preparatem – nie są znane występujące regularnie lub utrzymujące się działania niepożądane. W pojedynczych przypadkach krople mogą powodować krótkotrwałe podrażnienie oka, przekrwienie gałki ocznej albo zapalenie spojówki. W razie zaobserwowania wystąpienia skutków ubocznych podczas stosowania kropli ALECTOIN należy zgłosić je lekarzowi, farmaceucie albo dystrybutorowi preparatu. W przypadku utrzymywania się działań niepożądanych produktu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Przechowywanie

Termin ważności umieszczony jest na pudełku oraz buteleczce z kroplami.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Należy przechowywać w temperaturze 2-25°C.

7. Informacje dodatkowe

Krople do oczu ALECTOIN mogą być stosowane po zabiegach i urazach w obrębie oczu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Brak jest danych dotyczących stosowania kropli ALECTOIN w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią. W przypadku:

- ciąży lub karmienia piersią

- podejrzenia ciąży

przed zastosowaniem kropli do oczu ALECTOIN należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku 10 lat i młodsze, a także osoby niemogące samodzielnie zastosować preparatu

powinny skorzystać z pomocy

osób trzecich.

8. Postać preparatu

Preparat dostępny jest w postaci kropli o pojemności 10 ml

Skład:

Ectoin®, hydroksyetyloceluloza, chlorek sodu, woda, bufor cytrynianow

Podmiot odpowiedzialny

bitop AG

Stockumer Str. 28

58453 Witten, Niemcy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Elizówka 65

21-003 Ciecierzyn, Polska