

ASPIRATOR d/nosa NANOSEK d/dzieci 1 szt.

Cena: 12,20 zł



Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczony jest do udrażniania dróg oddechowych u niemowląt jak i małych dzieci poprzez usuwanie zalegającej wydzieliny w nosie. Wykonanie zabiegu ułatwia oddychanie a co za tym idzie samopoczucie dziecka.

Sposób użycia:

1. Ostrożnie umieść końcówkę w jednej z dziurek w nosie dziecka
2. Drugą końcówkę umieść w ustach i delikatnie wciągaj powietrze wyciągając wydzielinę do zbiorniczka
3. W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.