

ASPIRATOR SOPELEK 3 VACUUM +10fil.+2podkł.+adapter

Cena: 29,06 zł



Opis produktu

Aspirator do nosa SOPELEK3 w dwóch wersjach: odciąganie za pomocą ust oraz odciąganie za pomocą odkurzacza, umożliwia usunięcie wydzieliny z noska dziecka i tym samym pomaga mu w przywróceniu swobodnego oddychania.

POJEMNOŚĆ: 1 sztuka

DZIAŁANIE:

Aspirator do nosa SOPELEK 3+ w dwóch wersjach: odciąganie za pomocą ust oraz odciąganie za pomocą odkurzacza, systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych) oraz pomaga w leczeniu schorzeń dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc). Jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne dla niemowląt SOPELEK baby mają zastosowanie w trakcie przewijania dziecka w domu, w przychodni czy podróży.

WSKAZANIA:

Aspirator SOPELEK 3+ przeznaczony jest do usuwania wydzieliny z nosa dziecka, co umożliwia swobodne oddychanie.

DAWKOWANIE:

ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ UST

Metoda może służyć zarówno do codziennej higieny noska jak i do usuwania zalegającej wydzieliny.

Aspirator należy złożyć zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.

Ułóż dziecko w dogodnej pozycji, umieść ustnik w swoich ustach, a końcówkę donosową z jednorazowym filtrem w otworze nosowym dziecka.

Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik najpierw w jednym, następnie drugim otworze nosowym.

Wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym filtrem z cylindra głównego. Zużyty filtr wyrzucić do kosza.

Pozostałe elementy wyparzyć w gorącej wodzie (ok. 90oC) przez max. 15 sekund.

ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ ODKURZACZA

Metoda może służyć tylko do usuwania zalegającej wydzieliny.

Do procesu usuwania wydzieliny z noska używamy odkurzaczy o mocy 500-1000 W.

Aspirator należy złożyć zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.

Ułóż dziecko w dogodnej pozycji i delikatnie dosuń końcówkę aspiratora w pobliże jednego, następnie drugiego otworu nosowego dziecka (odciąganie powinno trwać max. 5 sekund, ruch góra- dół).

Wyłącz odkurzacz, wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z cylindra głównego, a jednorazowy filtr z korka. Zużyty filtr wyrzucić do kosza.

Pozostałe elementy wyparzyć w gorącej wodzie (ok. 90oC) przez max. 15 sekund. Adapter i wężyk nie wymagają wyparzania, wystarczy przemyć ciepłą wodą.

SKŁAD:

Opakowanie zawiera:

aspirator + 10 jednorazowych filtrów

adapter do podłączenia odkurzacza

2 jednorazowe podkłady Sopelek Baby

OSTRZEŻENIA:

Proces odciągania wydzieliny z nosa dziecka może zostać przeprowadzony tylko przez osobę dorosłą.

Jeżeli błona śluzowa nosa dziecka jest wysuszona lub widoczna jest duża ilość gęstej wydzieliny, zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego dziecka 3-4 krople soli fizjologicznej lub specjalnego donosowego roztworu wody morskiej.

Nie stosować aspiratora w przypadku uszkodzeń błony śluzowej nosa, krwawienia lub hemofilii.

Z uwagi na umieszczony w korku adaptera otwór bezpieczeństwa siła ssąca odkurzacza jest zredukowana, dzięki czemu aspirator jest bezpieczny przy stosowaniu u dzieci.

Aspirator SOPELEK3+ wyróżnia się tym, że odciągana wydzielina przy zastosowaniu siły ssącej odkurzacza jest zatrzymywana na filtrze

Podmiot odpowiedzialny

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice