

BLIZNASIL ŻEL plastry na blizny 17x3,5cm * 3szt

Cena: 73,31 zł



Opis produktu

Wskazania

BLIZNASIL plastry na blizny to innowacyjny produkt przeznaczony do leczenia wszelkiego rodzaju blizn, ze szczególnym uwzględnieniem wąskich i długich blizn po cesarskim cięciu.

BLIZNASIL plastry na blizny można stosować na każdą bliznę, bez względu na sposób i czas jej powstania. BLIZNASIL jest przeznaczony do leczenia następujących rodzajów blizn:

- Blizny po cesarskim cięciu
- Blizny po operacjach chirurgicznych
- Blizny po operacjach plastycznych
- Blizny po terapiach laserowych
- Blizny pourazowe
- Blizny poparzeniowe
- Blizny przerostowe

Bliznowce (keloidy)

BLIZNASIL plastry na blizny mogą być stosowany u dorosłych (także ze skłonnością do uczuleń i alergii) oraz u dzieci bez względu na wiek.

Działanie

BLIZNASIL plastry na blizny wykorzystują potwierdzone naukowo właściwości medycznego silikonu, który jest uznawany za najskuteczniejszy składnik w leczeniu blizn. Odtwarzają naturalną barierę, właściwą dla zdrowej skóry. Regularnie stosowane zmniejszają widoczność i wielkość blizn oraz wyrównują ich koloryt. Uelastyczniają blizny oraz znoszą uczucie napięcia i świądu. Zmniejszają ryzyko powstania blizn przerostowych i bliznowców (keloidów) oraz łagodzą objawy związane z powstałymi już bliznami nieprawidłowymi.

BLIZNASIL plastry na blizny, pokryte jedwabistym, elastycznym materiałem, zapewniają idealne dopasowanie do powierzchni ciała, pozwalają skórze oddychać, chroniąc jednocześnie przed ewentualnymi podrażnieniami i otarciami spowodowanymi przez ubranie. Ponadto cielisty materiał zapobiega rolowaniu i odklejaniu się plastra, zapewnia komfort oraz dyskrecję.

BLIZNASIL plastry na blizny są polecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Skład

Zawartość opakowania: trzy plastry silikonowe do wielokrotnego użytku w indywidualnych szczelnych opakowaniach, podkładka do odkładania plastra, ulotka informacyjna.

Dawkowanie, ogólnie

Stosowanie i sposób użycia: Leczoną bliznę należy umyć i osuszyć. Usunąć folię zabezpieczającą z plastra i nakleić go bezpośrednio na bliznę. Plaster powinien pozostawać na skórze przez co najmniej 12 godzin na dobę. Przynajmniej raz dziennie należy plaster zdjąć, aby przemyć bliznę mydłem bez substancji nawilżających, następnie ponownie nakleić plaster. Na czas mycia blizny lub przerwy w kuracji, plaster można odłożyć na podkładkę dołączoną do opakowania, klejącą stroną do dołu. Jeden plaster można stosować nawet przez 14 dni. W razie potrzeby plaster można umyć, używając do tego wody i zwykłego mydła (bez substancji nawilżających), następnie pozostawić do wyschnięcia. Mycie plastra pomiędzy jego zastosowaniami pomaga przywrócić jego właściwą przylepność, a jednocześnie nie ma wpływu na jakość warstwy silikonowej.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowany sposób odżywiania się jest niezbędny dla zachowania zdrowia.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.