

GAZA bawełniana niejałowa 1/2m 17N PASOMED



Cena: 100,00 zł

Opis słownikowy

Postać	Środek higieniczny
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

GAZA bawełniana niejałowa 1/2m 73N PASO

Gaza niejałowa,
Produkowana ze 100% bawełnianej gazy #17-nitkowej spełniającej najwyższe standardy jakości, zgodne z Europejską Normą EN 14079,
Może być stosowana bezpośrednio na ranę po uprzednim wyjąłowieniu.

ZASTOSOWANIE:

Wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do sterylizacji. Wyrób niejałowy można stosować do opatrywania ran jako bariera mechaniczna. Wyrób jałowy – po sterylizacji, można stosować do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Stosować niezwłocznie po otwarciu opakowania. Podczas procedur inwazyjnych wyrób stosować w stanie nierozwiniętym. Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Nie sterylizować повторно. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia. Po przesiąknięciu opatrunku wymienić wyrób na nowy. Stosować nie dłużej niż 24 godziny od chwili założenia lub postępować według zaleceń lekarza. Używać do czasu zagojenia rany.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie zidentyfikowano przeciwwskazań.
INFORMACJE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO:

W celu przeprowadzenia sterylizacji należy przepakować wyrób w opakowanie właściwe dla metody sterylizacji. Sterylizować czystym tlenkiem etylenu
w stężeniu 450 ÷ 800 mg/l w temperaturze 52 ÷ 58 °C, przez 6 godzin, w procesie zwalidowanym.

UWAGA: Paso-Trading Sp. Z o.o. nie odpowiada za walidację, regularną kontrolę i monitorowanie procesu sterylizacji realizowane przez użytkownika końcowego

Dostępne modele:

17-nitkowa
½ m2;

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE:

Zawartość: 1 szt.

KATEGORIA WYROBU:

wyrób medyczny:

Podmiot odpowiedzialny:

Paso Trading
Adres 95-200 Pabianice
ul. Lutomska 48

Kontakt tel./fax: 42 215 32 50